


# S-Monovette® Citrat

## Wichtige Information zur Handhabung

Zur Vermeidung von Fehlmessungen und Nichtbearbeitung der Proben aufgrund von Unterfüllungen ist ein **exaktes Füllvolumen** und damit **korrektes Mischungsverhältnis (1:10)** zwingend erforderlich.


Diese Fehler lassen sich vermeiden, wenn die S-Monovette® Citrat bis zum Anschlag aufgezogen wird. Danach noch ca. 5 sec. warten, bis der Blutfluss sichtbar stoppt.

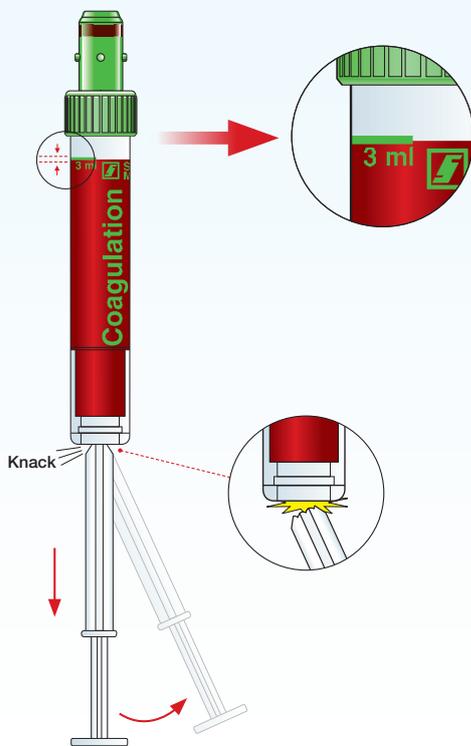

### Barcode-Etikettierung

**richtig**

**falsch**

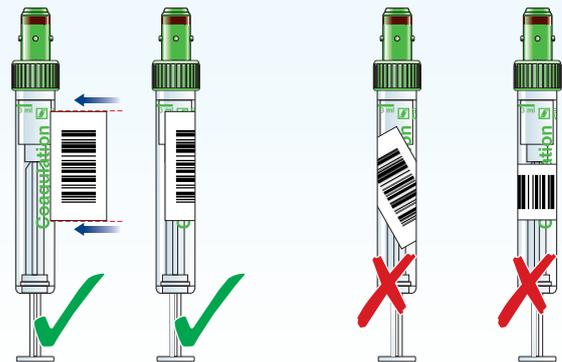


### Konnektierung

S-Monovette® zur Konnektierung mit Safety-Kanüle oder Safety-Multify® **immer aufrecht** halten.

**richtig**

**falsch**

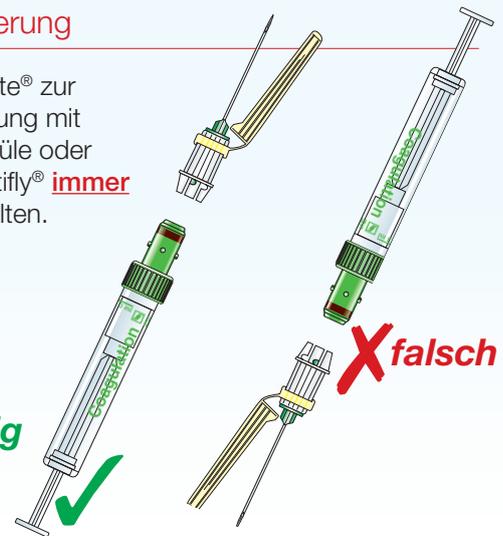

### Blutentnahme der S-Monovette® Citrat mit Safety-Multify®-Kanülen

Bei Verwendung eines Safety-Multify®-Sets sollte die S-Monovette® Citrat **nie als 1. Röhrchen** verwendet werden, da durch die Luft im Schlauch (20 cm Länge = 300 µl) eine Unterfüllung die Folge wäre.



Sollte ausschließlich eine S-Monovette® Citrat eingesetzt werden, immer erst eine andere S-Monovette® (z.B. Serum) zum „Befüllen des Schlauches“ davor setzen!

### Wichtig: Gut mischen!

Die Blutprobe direkt nach der Entnahme **mindestens 3x** über Kopf schwenken!

